



NEU
Erkenntnisse
für bessere
Ergebnisse

Innovation

TENA Identifi™ – unterstützt evidenzbasierte
Kontinenzassessments für eine bessere,
individuelle Versorgung



TENA Identifi™

Together we make a difference

Zur Ermittlung des tatsächlichen Bedarfs Ihrer Bewohner

Das TENA Identifi™ System verhilft Institutionen zu detaillierten und bislang nicht vorhandenen Informationen zum Miktionsverhalten ihrer Bewohner. Die Informationen lassen sich leicht in Pflegepläne integrieren, um so dem tatsächlichen Bedarf jedes einzelnen Bewohners zu entsprechen.



Eine Packung mit 12 Stück TENA Identifi™ Sensor Wear Einweg-Produkten reicht üblicherweise für ein 72-Stunden Miktionsprotokoll.

Loggen Sie sich per Tablet oder Computer auf dem geschützten TENA Identifi™ Web-Portal ein, um Ergebnisse zu bearbeiten und auf individuelle Miktionsprotokolle zuzugreifen.

Der leicht zu reinigende TENA Identifi™ Logger begleitet den Bewohner während der kompletten Messung. Der Logger ist wiederaufladbar und wiederverwendbar.

Die TENA Identifi™ System Gebrauchsanweisung mit detaillierteren Tipps und Ratschlägen finden Sie unter tenaidentifi.sca.com



SCA Care of life. Weil unsere Produkte das Leben für Sie und für Millionen Menschen in aller Welt einfacher machen. Weil unsere Ressourcen und unsere Arbeitsweise zum globalen Lebenszyklus gehören. Und weil wir engagiert sind.

www.TENA.de
www.TENA.at
www.TENA.ch



58%
weniger
Auslaufen*

„Dies ist eine neue technologische Lösung, die die Lebensqualität der Patienten, das Arbeitsumfeld und die Zufriedenheit des Personals verbessert hat.“

Susanne Eriksen, Leiterin der Pflegestation
Munkehatten, Gemeinde Odense

* Kundenergebnisse aus 324 Vor- und Nachüberwachungsberichten mit TENA Identifi™ in Dänemark



„Wir erhalten präzise Daten

über jeden Patienten, sodass wir vielen unnötigen Produktwechseln vorbeugen und unseren Patienten bei einem erfolgreichen Toilettengang helfen können.“

Susanne Bladt, Kontinenz-Koordinatorin
 Professionelle Unterstützung und Entwicklung,
 Gemeinde Odense

Detaillierte Miktionsprotokolle – deutlich verbesserte Pflege

Um jeden Bewohner individuell pflegen zu können, ist eine präzise Beurteilung der Kontinenz von zentraler Bedeutung. TENA Identifi™ ist ein praktisches System, das das Miktionsverhalten des jeweiligen Bewohners über 72 Stunden aufzeichnet und Muster sowie Volumina präzise protokolliert. Die detaillierten Daten helfen Ihnen, das richtige Inkontinenzprodukt auszuwählen, Toilettengänge optimal zu planen und Pflegepläne entsprechend anzupassen. So trägt TENA Identifi™ zu einer effektiveren, evidenzbasierten Kontinenzversorgung bei – und damit auch zu mehr Wohlbefinden bei den Bewohnern.

Eine neue Dimension des Wissens

TENA Identifi™ ist ein komfortables, tragbares System, das sich einfach und ohne den Bewohner zu beeinträchtigen, in die tägliche Routine integrieren lässt.

Für die Messung wird das gewohnte Inkontinenzprodukt durch die hoch saugfähige, bequeme TENA Identifi™ Sensor Wear ersetzt. Diese Einweg-Schutzhosen registrieren Miktionen über feine integrierte Sensoren.

Der wiederverwendbare TENA Identifi™ Logger, der in die TENA Identifi™ Sensor Wear eingesetzt wird, protokolliert die Miktion. Die Daten werden automatisch per mobilem Internet an ein geschütztes Web-Portal übertragen und dort in ein übersichtliches Miktionsprotokoll umgewandelt. Dabei wird die Privatsphäre des Bewohners stets gewahrt.

Um ein Miktionsprotokoll zu erstellen, muss der Bewohner die TENA Identifi™ Sensor Wear Produkte mit dem TENA Identifi™ Logger 72 Stunden (3 Tage) hintereinander tragen. Die TENA Identifi™ Sensor Wear wird entsprechend der individuellen Pflegepläne gewechselt und dann entsorgt.



Sensor Wear

Der TENA Identifi™ Logger wird bei jedem Produktwechsel entfernt und in die neue TENA Identifi™ Sensor Wear eingesetzt.



Die Daten werden automatisch und sicher übermittelt und in ein Miktionsprotokoll umgewandelt. Das beste Ergebnis erreicht man, indem kontinenzrelevante Daten wie Toilettengänge, Ausläufe etc. per mobilen Geräten wie Tablets oder Laptop im TENA Identifi™ Web-Portal vermerkt und diese so ins Protokoll aufgenommen werden.

Förderung von Kontinenz, der Lebensqualität und der individuellen Versorgung

TENA Identifi™ liefert wertvolle Erkenntnisse etwa zu der Frage, wann der Bewohner Unterstützung beim Toilettengang braucht, welche Produkte er benötigt und wann sie zu wechseln sind. Das hilft Pflegekräften bei der Erstellung individueller Versorgungspläne, fördert die Lebensqualität der Bewohner und ermöglicht die Auswahl des richtigen Inkontinenzprodukts. Ein Produkt mit der richtigen Saugstärke erhöht den Komfort und beugt Ausläufen sowie Hautreizungen vor. Außerdem sinken so Produktverbrauch und Umweltbelastung.

TENA Identifi™ sammelt Miktionsdaten. Das daraus resultierende Muster ist wertvoll für die Erstellung effektiver Toilettenpläne.

Das System schätzt das Miktionsvolumen bei jedem Produktwechsel – das daraus resultierende Muster über die 72-Stunden-Messung ist eine gute Basis für die Produktauswahl. Das Produkt muss nicht gewogen werden.

Diese neuen Erkenntnisse in neue individuelle Pflegepläne zu übernehmen und sie mit allen Pflegekräften zu teilen, ist die perfekte Grundlage für eine verbesserte Versorgung.

